


ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОННА ГОРТАНЬ

LABEX™ COMFORT

НАСТАНОВА З ВИКОРИСТАННЯ

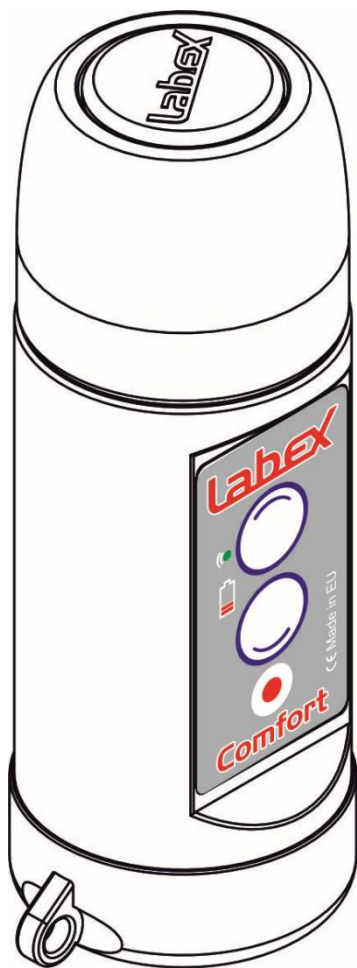

Більше інформації:
labex.in.ua/comfort/

V5-2 (липень 2025)



Огляд

1. Що таке Labex Comfort

Labex Comfort це цифровий електроларингофон. Він спеціально розроблений, щоб допомогти спілкуватися людям після ларингектомії. Його головна особливість – це дві керовані кнопки для розмови.

Загальний принцип роботи

Цифрова електрогортань створює механічні вібрації на низькій частоті звуку (50–175 Гц). При прикладанні до шиї ці вібрації викликають коливання в ротовій порожнині, що компенсує відсутню енергію з легень. Поеднання запуску/зупинки звукових вібрацій та артикуляції створює зрозумілу мову.

2. Комплектація

У коробці ви знайдете все необхідне для початку користування:

1. Пристрій Labex Comfort
2. 2 акумуляторні батареї 9V Li-Po
3. Фірмовий шнурок Labex
4. Інструкція користувача
5. Гарантійна картка

3. Компоненти та панель керування

Labex Comfort складається з декількох основних компонентів:

1) Верхня головка – частина яку ви притискаєте до шиї.

2) Розмовна кнопка 1 – верхня розмовна кнопка, з її допомогою можна змінювати гучність і тон.


3) Розмовна кнопка 2 – нижня розмовна кнопка, з її допомогою можна змінювати гучність і тон.

4) Кнопка для налаштування використовується для зміни параметрів .

5) Індикатор LED - загоряється при натисканні однієї з двох розмовних кнопок.

6) Індикатор батареї - загоряється, коли слідє замінити батарею.

7) Кришка батареї - закриває секцію батареї.

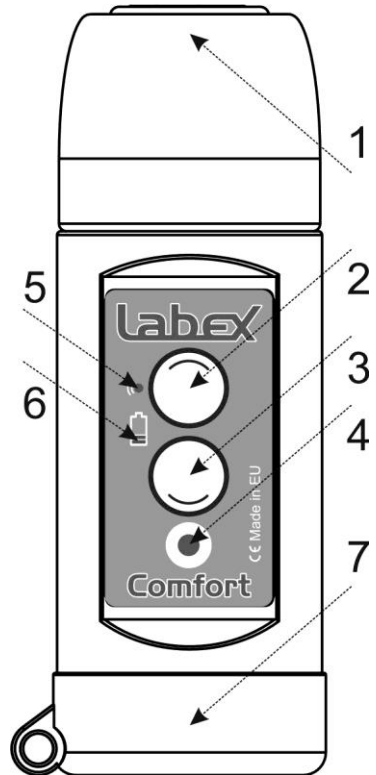


Зауваження: Кнопки вашого приладу достатньо чутливі. Для спрацювання достатньо зусилля в 160г. Будь-ласка, утримуйтеся від надмірних зусиль при натисканні. Це може призвести до поломки вашого пристрою.

ПОЧИНАЄМО ВИКОРИСТАННЯ

4. Встановлення батареї

- a. По-перше, потрібно встановити батарею. Візьміть одну з двох батарей, зніміть захисну пластикову плівку.
- b. Відкрутіть кришку батареї з нижньої частини приладу.
- c. Встановіть батарею в батарейний відсік, дотримуючись полярності. Позначки "+" та "-" на батареї та всередині приладу мають збігатися.
- d. Накрутіть кришку на нижню частину приладу.

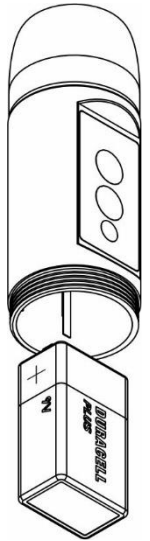

Увага: Якщо ви приєднаєте батарею не правильно, ваш прилад не пошкодиться. Просто не буде працювати.

5. Пошук "золотої" точки.

"Золота" точка дозволить звуку від приладу передаватись через шию та ротову порожнину найбільш чітко. Найпростіший шлях знайти вашу точку, це притискати площину звукової головки до шиї в різних місцях та одночасно натискати одну з двох розмовних кнопок. Все, що ви шукаєте, це місце на шиї, яке найкраще передає звук. Шукаючи вашу "золоту" точку, важливо щільно притискали прилад до шкіри шиї, щоб звук як найкраще проходив тканини тіла, а потім і ротову порожнину. Приділіть ваш час на пошук "золотої" точки - це без перебільшень найважливіший момент навчання використання

Labex Comfort, Липень 2025, # 5
голосовідтворюючого пристрою. Якщо ви знайдете
найкраще місце, вас чекає успіх.

6. Перші слова

Після того, як ви знайшли бажану точку, ви можете починати робити деякі базові звуки. Спочатку зосередьтесь на поодиноких голосних звуках. Дуже чітко промовляйте кожен звук ротом, поки не відчуєте себе комфортно з усіма голосними. Після цього можете починати практикуватись з короткими словами. Не поспішаючи рухайтесь на шляху до речень та спілкування.

Покрокова інструкція



НАЛАШТУВАННЯ

7. Як змінити гучність

Ви можете коригувати гучність кожної кнопки окремо. Для налаштування гучності приладу виконайте наступні дії:

- Натисніть та утримуйте одну з двох розмовних кнопок доки прилад не зазвучить.
- Під час утримання бажаної розмовної кнопки, натисніть та утримуйте кнопку для налаштування.
- Утримуйте обидві кнопки. Звук припиниться, і червоний світлодіод почне спалахувати.

- Після декількох секунд, пристрій почне гудіти. Відпустіть усі кнопки. Тепер пристрій у “Режимі налаштування гучності”.
- Зараз ви можете використовувати розмовну кнопку 1 для збільшення гучності, або розмовну кнопку 2 для зменшення гучності.
- Коли ви досягнете бажаної гучності, натисніть кнопку для налаштування для підтвердження. Прилад автоматично збереже вашу бажану гучність.

Зауваження: Ви можете вибрати різну гучність для кожної розмовної кнопки.

8. Як змінити тон

Ви можете коригувати тон кожної кнопки окремо. Для налаштування тону приладу виконайте наступні дії:

- Натисніть та утримуйте кнопку для налаштування.
- Під час утримання кнопки для налаштування, натисніть та утримуйте розмовну кнопку, для якої ви бажаєте змінити тон (розмовна кнопка 1 або розмовна кнопка 2).
- Утримуйте обидві кнопки. Звук припиниться, і червоний світлодіод почне спалахувати.
- Після декількох секунд, пристрій почне гудіти. Відпустіть усі кнопки. Тепер пристрій у “Режимі налаштування тону”.
- Зараз ви можете використовувати розмовну кнопку 1 для збільшення тону, або розмовну кнопку 2 для зменшення тону.

- Коли ви досягнете бажаного тону, натисніть кнопку для налаштування для підтвердження. Прилад автоматично збереже ваш бажаний тон.

Зауваження: Ви можете вибрати різний тон для кожної розмовної кнопки.

9. Як скинути всі налаштування до заводських

Якщо ви вирішили повернути налаштування гучності/тону приладу до заводських значень, то виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть та утримуйте одночасно всі три кнопки (розмовна кнопка 1, розмовна кнопка 2 та кнопка для налаштування) .
- 2) Почне спалахувати червоний індикатор батареї. Утримуйте натиснутими всі кнопки доти, доки червоний індикатор батареї перестане спалахувати та засвітиться постійно.
- 3) Коли червоний індикатор батареї почне постійно світитися, відпустіть всі кнопки та зачекайте 3-4 секунди. Всі налаштування будуть відновлені до заводських.

БАТАРЕЯ

10.Стан розряду батареї

Ваш Labex™ має двох-ступінчасту індикацію рівня заряду батареї. Коли лишилося 20% рівня заряду батареї, індикатор буде спалахувати протягом 3-х секунд після кожного відпускання будь-якої розмовної кнопки. Коли лишилося 10% рівня заряду батареї, індикатор буде постійно горіти протягом 3-х секунд після відпускання будь-якої з розмовних кнопок. Це свідчить про необхідність замінити батарею.

11.Які батареї підходять

В комплекті з вашим Labex Digital йдуть дві перезаряджаємі батареї Li-Po 9V. Це дозволить вам завжди мати під рукою свіже заряджену батарею. Окрім того, Labex Digital сумісний з усіма 9-вольтовими батареями (типа "крона") на ринку - як звичайними батарейками, так і перезаряджаємими.

12.Зарядження батарей

- 1) Під'єднайте кабель з комплекту до micro-USB (Type-C) порту батареї.
- 2) Інший кінець — у будь-який USB A-порт.
- 3) Стежте за індикатором зарядження на батареї.

Догляд за ВАШИМ ПРИСТРОЄМ

13.Як чистити прилад

Очищуйте пристрій кожні 24 години.

1. Протирайте зовнішні частини злегка вологою мікрофіброю.
2. Дезінфікуйте гелем або спиртом.
3. Знову протріть сухою серветкою.

14.Стійкість до вологи

Labex Comfort витримує використання під дощем або миття мокрою ганчіркою. Однак занурення пристрою у воду пошкодить пристрій і позбавить вас гарантії.

15.Контактна інформація



LABEX TRADE LTD.

59 Sankt Peterburg Blvd., Fl. 6,
Off. 604
4017 Plovdiv, Bulgaria, European
Union
T: +359 32 54 9090,
M: +359 878 616 711

Представник:

ТОВ Хелс трейдинг
МН

Бородянський
пров. 3
м.Київ

e-mail: magerkiev@gmail.com

WEB: www.labex.in.ua

Тел - +380 67 750 2844



16. Технічна специфікація

Загальні дані:	
Регулювання тону	Так
Регулювання гучності	Так
Розмовна кнопка	2
Кнопки для налаштувань	1
Діапазон частот	50 - 165 Гц
Діапазон гучності	60-83 дБ
Час розмов	6-10 год. від повного заряду
Фізичні параметри:	
Діаметр x Довжина	Ø34 x 98 мм
Вага	72г без батареї
Пило / Волого-стійкість	Так
Батарея:	
Ємність	1000 мАг
Тип	Перезаряджаєма 9V6F22 Li-Po
Кількість в комплекті	2 шт
Ресурс батареї	Більше 500 циклів
Зарядний пристрій	Будь яке джерело USB
Час заряджання від 0 до 100%	4 г. 30 хв. з зарядним від Labex
Виробник елементів	EBL (Тайвань)

ІНФОРМАЦІЯ

Попередження

- Не занурюйте пристрій у воду
- Не мийте під краном
- Не розбирайте
- Не використовуйте неоригінальні зарядні пристрої
- Не вставляйте жодні частини в стому
- Не пошкоджуйте батарею
- Не замикайте батарею
- Не заряджайте батарею при температурі $< 0^{\circ}\text{C}$
- Пристрій містить магніт — може впливати на кардіостимулятори

Зберігання

- Зберігайте в сухому й темному місці
- Перевозьте лише в оригінальній упаковці
- Заряджайте батарею раз на 6 місяців при тривалому зберіганні
- Температура: від -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$

Гарантійні умови

- Гарантія: 2 роки
- Покриває: дефекти матеріалів і збірки

- Не покриває: батареї, зарядні пристрої, природні пошкодження, ударні ушкодження, рідини, стороннє втручання
- Використання лише **однією особою**
- Гарантія **не передається**

Утилізація (WEEE)

Не викидайте пристрій із побутовим сміттям. Здавайте в пункти прийому електроніки. Дотримуйтесь місцевого законодавства щодо утилізації. Звертайтеся до продавця або місцевої влади щодо правильної утилізації.